


# “アクアライザー ウルトラ”


パスカルの原理を応用したインスタントスプリントです。

STEP 1 取り出し

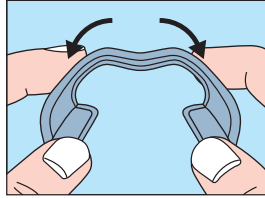

アクアライザーは、袋から取り出して患者の口腔内に装着するだけです。蒸留水が入った水枕状パッドにより咬合が挙上され、咬合圧が左右均等に働いた状態で、顎関節の筋肉をリラックスさせます。


STEP 2 装着

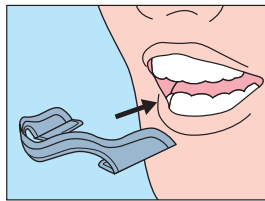

連結管を通じて水が咬合圧を伝えます。

STEP 3

臼歯部にパッドに乗せる

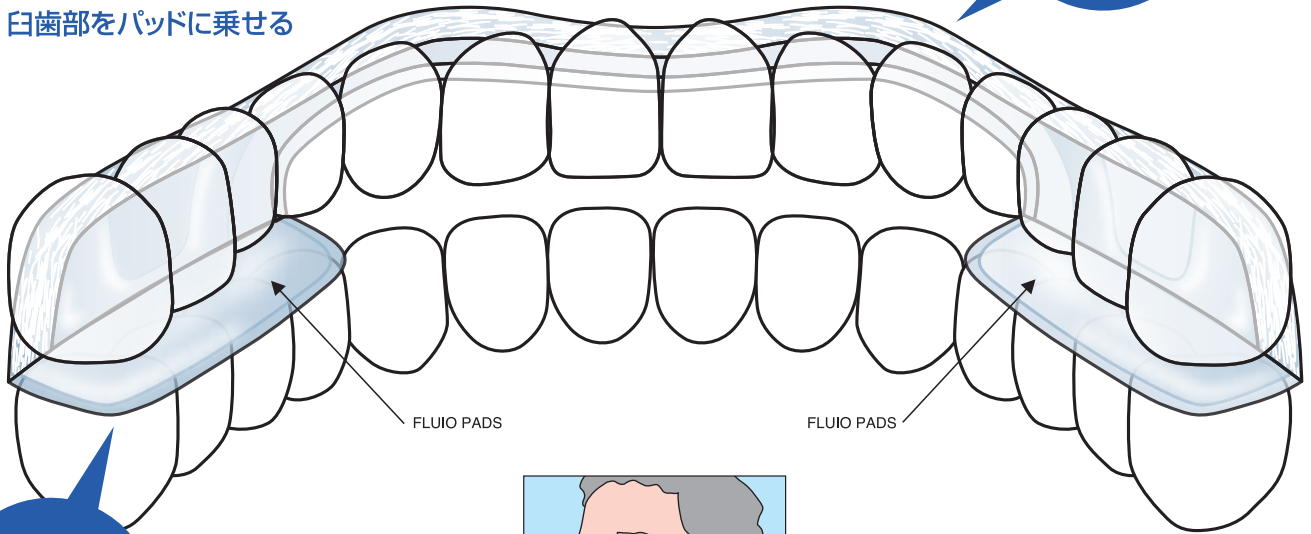


蒸留水が入った水枕状パッドです。

STEP 4 調整



STEP 5

正しい装着状態

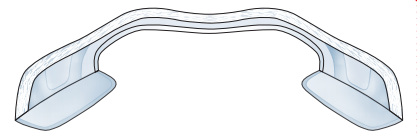

アクアライザー ウルトラ  
アクアライザー ウルトラは上顎の形状に合わせた製品です。

# AQUALIZER

アクアライザー



# アクアライザー ウルトラ

## 【種類】


1. 形状 形状は、1種類です。  
アクアライザー ウルトラ
2. 大きさ 大きさは、1種類です。
3. 高さ 水の入った袋の高さは「L」「M」「H」の3種類です。
  - ①L (Low) = 2mm
  - ②M (Medium) = 3mm
  - ③H (High) = 4mm

## 【使用目的】

- アクアライザーは、下記の目的でご使用ください。
1. 顎関節の筋肉のリラクゼーション  
水の入った袋を介して上下の歯牙の接触がなくなったフローティングの状態により、顎関節周辺の筋肉の緊張が緩和されます。
  2. 咬合調整部位の発見  
筋の緊張が緩和された状態でアクアライザーの表面に印記された痕跡は、より正確な咬合調整部位を表しています。
  3. 鑑別診断  
顎関節症が疑われる患者にアクアライザーを適用して効果が認められる場合は、スプリント治療が適していると判断されます。

## 【応用例】

右に応用例を示します。  
臨床では、個々の患者の  
症状に合わせてご検討ください。

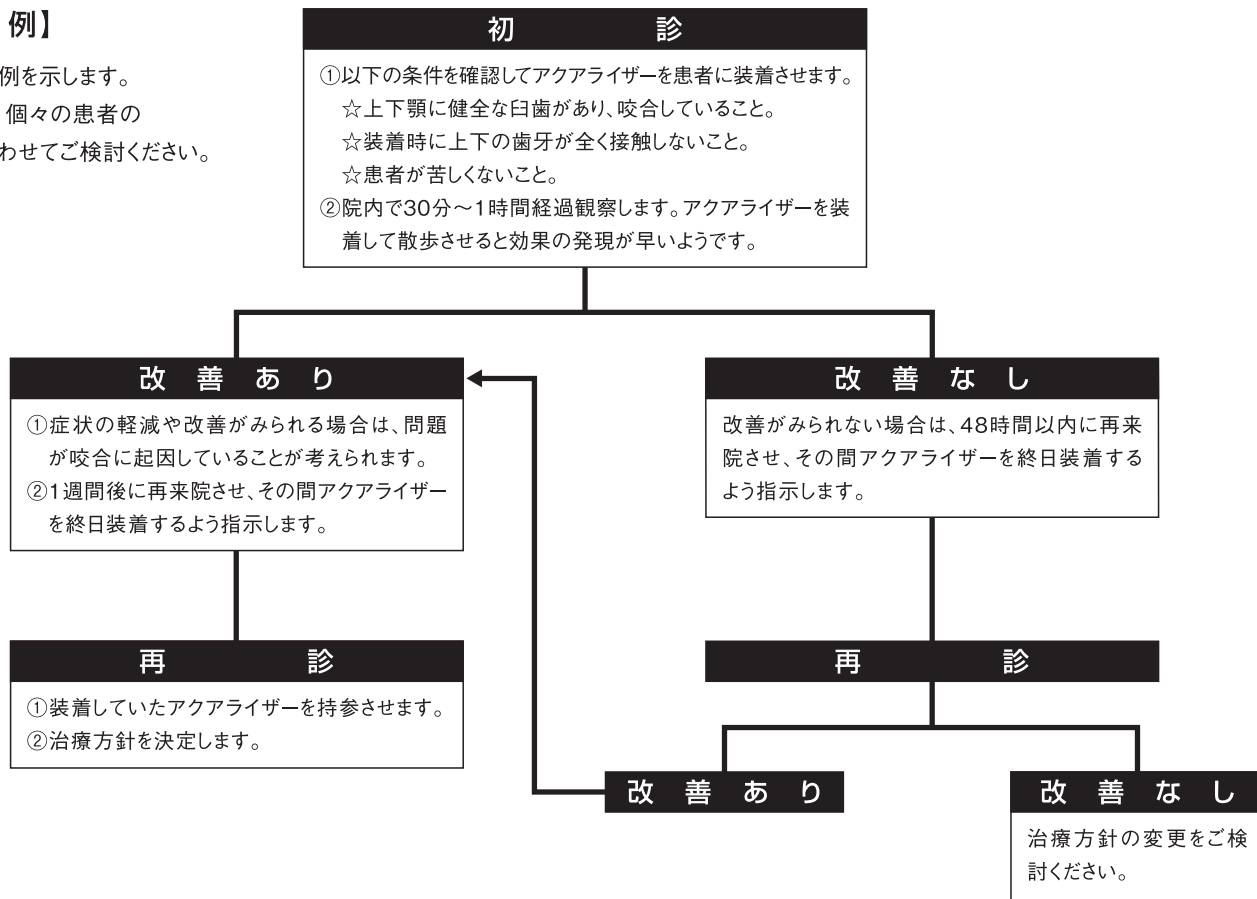

## 【留意点】

- ①アクアライザーを適用する場合は、「臼歯が揃っていて、アクアライザーを装着した時に上下の歯牙が接触しないこと。」をご確認ください。
- ②アクアライザーを装着した時に患者が高いと訴える場合は、1段低い製品をお試しください。
- ③食事や歯磨きなどの時間を除いて、終日の装着を患者にご指示ください。
- ④アクアライザーは、口腔内に装着し3～7日で水が抜けると推定されます。抜けても捨てずに再来院の時に持参するよう患者にご指示ください。
- ⑤アクアライザーは、保管中に水が蒸発する恐れがありますので、冷暗所に保管してください。
- ⑥本商品は、保険請求できません。

この商品の  
webサイトはこちら



医療機器届出番号：  
13B2X10261000201  
一般医療機器[クラスI]  
Drラーマン開発  
ADA承認品  
日本特許1431199

**株式会社 東京歯材社**  
〒110-0001 東京都台東区谷中2-5-20  
TEL: (03)3823-7501(代) FAX: (03)3823-7516  
http://www.shizaisha.co.jp

商品センター  
〒110-0004 東京都台東区下谷3-13-5  
TEL: (03)3874-5077  
FAX: (03)3874-5091